

SICHERE UNTERSTÜTZUNG

Produkte für Adipositas-Patienten müssen extremer Belastung standhalten. Stützklappgriffe, Haltegriffe und Duschbänke mit zusätzlichen Verstärkungen und innenliegenden Stahlkern bieten eine Stützlast von bis zu 300 kg.

MONTAGE VON HALTEGRIFFEN UND STÜTZKLAPPGRIFFEN

Bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfüterung aus Schichtholzplatten oder Hartholz mit einer Stärke von mindestens 30 mm erforderlich. Zudem darf ausschließlich das Befestigungsmaterial von HEWI verwendet werden. Die Edelstahlschrauben sind entsprechend auf die Eigenschaften der Wand abgestimmt.

DUSCHE

Wir empfehlen den Einsatz von Duschbänken, sie bieten den Vorteil, dass sie flexibel einsetzbar sind. Diese sollten in einer bodengleichen Dusche eingesetzt werden, da oftmals Duschtassen nicht über eine ausreichend hohe Belastbarkeit verfügen.

WASCHTISCH

Damit ein übergewichtiger Patient am Waschtisch ausreichend Unterstützung und sicheren Halt findet, empfiehlt es sich rechts und links einen Stützklappgriff anzubringen.

WC

Das WC muss für eine entsprechende Belastung ausgelegt sein. Stützklappgriffe links und rechts des WCs sichern Bewegungsabläufe beim Hinsetzen und Aufstehen. Bei einer WC-Lösung über Eck kann einer der Stützklappgriffe alternativ durch einen Haltegriff ersetzt werden.

BEWEGUNGSFLÄCHEN

Im Bad sollte ausreichend Bewegungsraum eingeplant werden.

